

Hochfrequenz-Anwendung mit dem Geissler-Bestrahler „Duplosan“

Vorbereitung:

- Vorführungen des Hochfrequenz-Strahlapparats sind für Personen mit aktiven medizinischen Implantaten nicht geeignet. Aktive Implantate enthalten, im Gegensatz zu den passiven Implantaten, eine Energiequelle, um Körperfunktionen zu überwachen, zu unterstützen und/oder zu ersetzen. Hierzu zählen z.B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Insulinpumpen und Schmerzpumpen.
- Die elektronischen Geräte im Umfeld ausschalten → Störungen durch Hochfrequenz verhindern
- Sich selbst auf einen Holzstuhl setzen → Keine Stromableitung über den Stuhl
- Drehschalter auf „Aus“ stellen → Gerät im Stillstand
- Netzstecker einstecken → Gerät in Bereitschaft

I. Anwendung indirekt (unipolar):

- Schalter am Elektrodengriff so umlegen, dass beim einen Schalter der rote Punkt nach oben zeigt und beim anderen Schalter der weiße Punkt unsichtbar wird
→ Einstellung für unipolare Anwendung
- Teströhrchen (Glasröhrchen mit zwei Metallkappen) vorsichtig herausnehmen
→ Prüf-Elektrode in Bereitschaft
- Drehschalter aufdrehen und mit einer Hand den metallischen Handgriff neben das Teströhrchen halten
→ Funktionsprobe: Prüfröhrchen leuchtet
- Zweite Person berührt mit einer Hand ganzflächig eine für die Behandlung gewünschte Körperregion (z.B. den Nacken)
→ Kribbeln zeigt die Wirkung an
- Nach 2-4 Minuten Gerät mithilfe des Drehknopfs wieder ausschalten
→ Überlastung des Geräts vermeiden
- Teströhrchen ablegen
→ Empfindliches Gerät sicher bewahrt

II. Anwendung direkt (bipolar):

- Schalter am Elektrodengriff so umlegen, dass beim einen Schalter der rote Punkt und beim anderen Schalter der weiße Punkt sichtbar wird
→ Einstellung für bipolare Anwendung
- Eine geeignete gläserne Elektrode auswählen und diese vorsichtig in den Elektrodenhalter einführen
→ Elektrode in Bereitschaft
- Den Elektrodenhalter am Metallgriff anfassen und z.B. den anderen Arm mit der Elektrode berühren
→ Gerät, Elektrode und Nutzer in Bereitschaft
- Das Gerät mithilfe des Drehknopfs einschalten und auf die gewünschte Stärke (6-12) einstellen
→ Violette Lichterscheinung in der Elektrode,
→ Sanftes Kribbeln zeigt die Wirkung an
- Nach 2-4 Minuten Gerät mithilfe des Drehknopfs wieder ausschalten
→ Überlastung des Geräts vermeiden
- Elektrode abnehmen, vorsichtig aus dem Elektrodenhalter ziehen und ablegen
→ Empfindliches Gerät sicher bewahrt
- Netzstecker ziehen
→ Elektronische Geräte (Umfeld) betriebsfähig