

Benutzung der Personenwaage


1

Dies ist eine mechanische Säulenwaage. Die Bedienung erfolgt manuell mithilfe der Laufgewichte. Zum Wiegen stellen Sie sich bitte auf die Waage und wenden sich den Gewichten zu.



2

Legen Sie den Hebel oben rechts um.

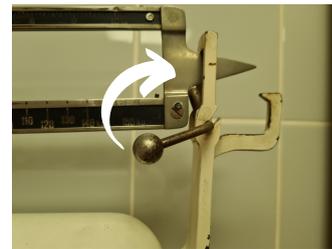

3

Stellen Sie Ihr ungefähres Gewicht mit dem großen Metallgewicht ein, runden sie dabei auf den nächsten Zehner ab. Heben Sie das Metallgewicht leicht an, um es zu verschieben.



4

Stellen Sie Ihr Gewicht mit dem auf 100g genau mit dem kleinen Metallgewicht ein. Wenn es zu niedrig eingestellt ist, geht der Zeiger leicht nach oben. Wenn es zu hoch eingestellt ist, leicht nach unten.



5

Ist das richtige Gewicht eingestellt, ist der Zeiger waagrecht. Falls er sich noch bewegt, können Sie ihn mit einer Hand stabilisieren und das kleine Gewicht nachjustieren.



Nachdem Sie sich gewogen haben, legen Sie bitte die Metallgewichte und den Hebel wieder in die originale Position (siehe Bild 1)!